

# Gouttière cosmétique

## Matériaux pour travailler

### Pour la fabrication:

- Erkodur-A1/A3, 1,0 mm (-A1, 2,0 mm, si la gouttière doit être ajustée)
- Pour un mordu éventuel: Erkoform-3d,-3/Occluform-3 (Erkoform-RVE/Occluform)

### Pour la préparation du modèle:

- Pour restaurer les dents cire à modeler (725 165), opaque-beige claire (cire esthétique).

### Pour la finition:

- Recommandation: Jeu de finition Quick 2 (voir aussi gouttières occlusales)
- Un disque flexible fin, corundé ou diamanté pour travailler les zones interdentaires. Jeu de polissage (110 878) pour polir.

## Conseils

- Les parties qui pourraient empêcher une bonne adaptation de la plaque doivent être enlevées (que se soit le plancher de la mandibule ou les zones sur les parties vestibulaires). Casser les bords coupants.
- Pour l'isolation et pour la compensation du retrait, thermoformer avec la plaque base la feuille d'isolation appliquée ex usine vers le modèle.
- Fabrication voir gouttière miniplastique. Les gouttières peuvent être mises sur les dents cosmétiquement défavorables.

**1.** Situation initiale cosmétiquement défavorable, par exemple après un accident. La gouttière sert puis aussi pour la stabilisation.



**2.** Le mieux serait de restaurer l'arcade des dents avec cire esthétique (cire à modeler (725 165), opaque-beige claire).

**3.** Le modèle doit être doublé pour le thermoformage.



**4.** Pour obtenir un image plus esthétique, les zones interdentaires sont particulièrement accentuées ...

Thermoformer et finir voir gouttières miniplastiques (AttBruxMichMin.pdf).

**5.** ... le mieux avec un disque flexible fin, corundé ou diamanté.



**6.** Gouttière cosmétique terminée en Erkodur-A1.

Veillez observer les instructions de nettoyage et de soin (pflege\_F.pdf).