

Kosmetische Schiene

Arbeitsmittel

Zur Herstellung:

- Erkodur-A1/A3, 1,0 mm (-A1, 2,0 mm, wenn die Schiene adjustiert werden soll)
- Für einen eventuellen Einbiss: Erkoform-3d,-3/Occluform-3 (Erkoform-RVE/Occluform)

Zur Modellvorbereitung:

- Zur Wiederherstellung der Zahnreihe Modellierwachs, 725 165 , opak-hellbeige (Ästhetikwachs)

Zur Ausarbeitung:

- Empfehlung: Ausarbeitungsset Quick 2 (siehe auch Aufbissschienen)
- Eine fein korundierte oder diamantierte flexible Scheibe zur Gestaltung der Interdentalräume, Polierset (110 878) zum Polieren

Tipps

- Modellbereiche (äußeres Vestibulum, Mundboden), die die Anformung behindern, müssen abgetragen werden. Scharfe Gipskanten brechen.
- Zur Isolierung und Schrumpfausgleich ab Werk aufgebrachte Isolierfolie zum Modell hin mit tiefziehen.
- Herstellung siehe Minioplastschiene. Die Schienen dienen zum Aufstecken auf die eigene, kosmetisch ungünstige Zahnreihe.

1. Kosmetisch ungünstige Ausgangssituation, z. B. nach einem Unfallgeschehen. Die Schiene dient dann auch zur Stabilisierung.



2. Die Zahnreihe wird am Besten mit Ästhetikwachs (Modellierwachs, 725 165 , opak-hellbeige) wieder hergestellt.

3. Zum Tiefziehen sollte das Modell dubliert werden.

Tiefziehen und Ausarbeiten siehe Minioplastschiene.



4. Um ein besseres ästhetisches Bild zu erhalten, werden die Interdentalräume deutlicher hervorgehoben...

5. ...am Besten mit einer fein korundierten oder diamantierten flexiblen Scheibe.



6. Fertige kosmetische Schiene aus Erkodur-A1.

Bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise (pflege.pdf) beachten.