



OCCLUFORM-3: Installazione ed uso

Dotazione: Occluform-3, cpl., cod.: 188 580

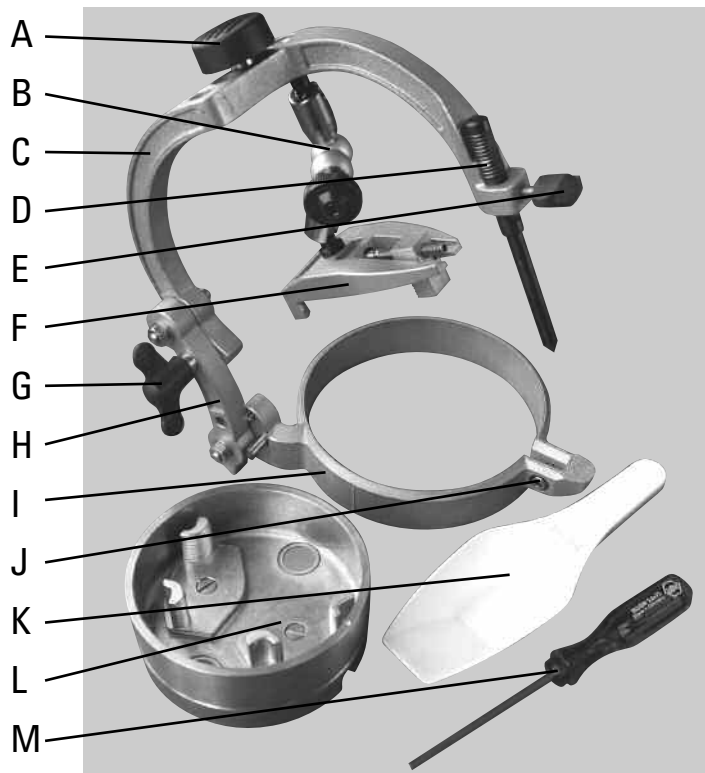

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|
| A, Manopola di pressione | E, Arresto perno di appoggio | I, Anello di fissaggio con vite di fissaggio |
| B, Snodo di arresto | F, Piastra porta-modelli | J, Paletta granulato |
| C, Staffa di occlusione | G, Vite snodo | L, Contenitore portamodelli |
| D, Asta di appoggio | H, Colonna snodo | M, Chiave a brugola n. 3 |

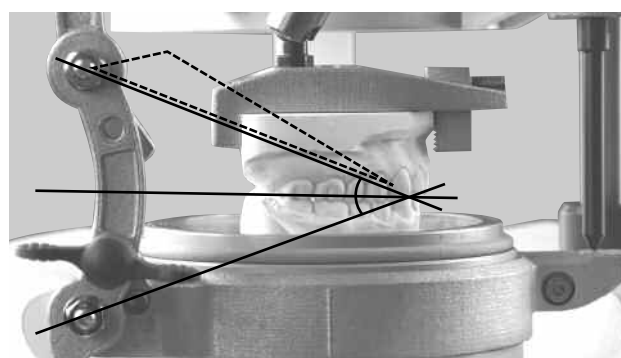


Occluform-3 si basa su un triangolo di Bonwill con una lunghezza di lato di 11,5 cm (triangolo tratteggiato) ed un angolo di Balkwill di 20°.

Istruzioni di montaggio



1. Posizionare Occluform-3 con l'anello di fissaggio trasversalmente sull'apparecchio 3d (asta di appoggio a destra).

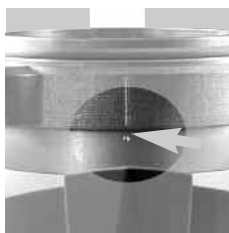

2. Allineare la marcatura sull'anello di fissaggio con il punto sul cestello di formatura.



3. Premere verso il basso l'anello di fissaggio e serrare la vite di fissaggio con la chiave a brugola (M).

Avvertenze per il rabbocco del sistema idraulico



1. Se diminuisce la forza di chiusura dello snodo di arresto, rabboccare olio: svitare completamente il controdado e toglierlo.



2. Versare l'olio (olio per macchine) finché il tubo è quasi pieno.



3. Chiudere nuovamente e controllare la forza di chiusura. Se vi fossero perdite d'olio sullo snodo, deve essere riparato.




ERKODENT Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • D-72285 Pfalzgrafenweiler • Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0
Fax: + 49 (0) 74 45/20 92 • e-mail: info@erkodent.com • www.erkodent.com

in Italia: Dellatorre-Vera SpA • Viale A. Volta 83 • 20090 Cusago (MI) • Tel.: + 02 903926.1 • Fax 02 90392640-43 • e-mail: info@dellatorrevera.it

Occluform-3: Impiego

Posizionamento dello snodo di arresto

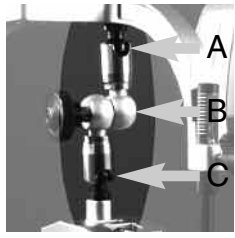

1. Aprire lo snodo di arresto (B) e allineare A, B e C come illustrato




2. Portare la piastra portamodelli superiore nella posizione più alta.



3. Questa è la miglior posizione di partenza per mettere in articolazione il modello.

Sulla base di un moderno articolatore a valore medio, Occluform-3 consente un rialzo del morso a valore medio. Se è disponibile una mascherina realizzata in bocca o su un articolatore completamente regolabile, questa va messa in articolazione nell'Occluform-3 sul modello. Una graduazione sull'asta di appoggio corrisponde a ca. 1 mm di rialzo del morso.


Registrazione dell'arcata antagonista per la realizzazione di una doccia individualizzata

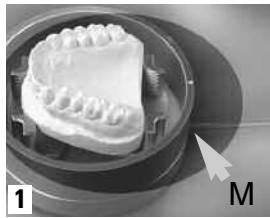

1. Fissare il modello da registrare nel contenitore portamodelli (chiave a bugola, M). Può essere opportuno inserire il modello in posizione obliqua (ad es. in presenza di forti sottosquadri).



2. Inserire il contenitore col modello nel cestello portamodelli dell'apparecchio 3d. Quando i punti di marcatura coincidono, il contenitore si innesta sul disco di centraggio.

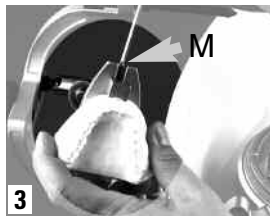

3. Fissare il modello dell'arcata antagonista nella piastra portamodelli superiore.



4. Se nel contenitore vi è il modello dell'arcata superiore, serrare lo **snodo superiore** (freccia sinistra) della colonna con l'apposita vite (fig.). Se nel contenitore vi è il modello dell'arcata inferiore, serrare lo **snodo inferiore**. Per l'articolazione lo snodo di arresto deve essere liberamente accessibile. Tenere il modello con l'apposita piastra e chiudere la staffa di occlusione, finché l'asta di appoggio. L'asta di appoggio coincide con la linea di marcatura 0 (Fig.). Mettere in articolazione i modelli.



5. Tenere la piastra portamodelli superiore e fissare lo snodo di arresto.



6. Se è disponibile una mascherina di registrazione, è possibile alzare il morso con l'asta di appoggio. Una graduazione sull'asta corrisponde ad un rialzo di ca. 1 mm sul punto incisale. Riaprire la staffa di occlusione su cui è fissato il modello dell'arcata antagonista.

7. Riempire il contenitore portamodelli di granulato (il contenitore può essere anche tolto a questo scopo).



8. All'occorrenza spingere il granulato anche sotto il modello e condensare bene.



9. Isolare il modello con un isolante incolore (Isolac, 624 050) (solo in caso di dischi morbidi, ad es. Erkoflex).



Termoformare come descritto nelle istruzioni Erkoform-3d.

10. Chiudere quindi **immediatamente** la staffa di occlusione fino all'arresto dell'asta di appoggio, la mano deve essere appoggiata sulla manopola di pressione.



11. L'arcata antagonista è stata registrata. Lasciar raffreddare completamente e sollevare la staffa.



12. Sollevare il portadischi dell'apparecchio, in tal modo si solleva anche il contenitore portamodello. Tenerlo, aprire l'anello di fissaggio dei dischi e togliere il contenitore con il disco.

